

Platforma wibracyjna (Whole Body Wave)

Skuteczna odpowiedź na sarkopenię: siła Wave Motion

Połącz korzyści treningu siłowego
i ćwiczeń aerobowych w zaledwie
10 minut dziennie, po prostu stojąc.



10 minut

Skuteczny trening
w krótkim czasie.



Całe ciało

Stymulacja
wielu grup
mięśniowych.



**Technologia
fuzyjna**

Ultradźwięki
+ PEMF



**Komfort
i bezpieczeństwo**

Niskoudarowa
praca przyjazna
stawom.



Dlaczego Wave Motion?

Zadbaj o zdrowie dzięki zaledwie 10 minutom treningu dziennie.



Zapobieganie i leczenie sarkopenii

Skutecznie stymuluje włókna mięśniowe, pomagając utrzymać masę mięśniową i sprawność fizyczną. Technologia została opracowana specjalnie z myślą o potrzebach fizjologicznych osób w średnim wieku i seniorów.



Większa stabilność postawy i aktywacja mięśni głębokich

Intensywnie aktywując mięśnie głębokie tułowia oraz kończyn dolnych, znacząco poprawia stabilność funkcjonalną i równowagę w codziennych ruchach.



Stymulacja krążenia i szybsza regeneracja

Precyzyjne mikrofały wspierają krążenie w całym organizmie, skutecznie redukują obrzęki obwodowe i przyspieszają usuwanie produktów przemiany materii (zmęczenia).



Nieinwazyjne łagodzenie bólu i relaksacja

Delikatna, przyjazna dla stawów stymulacja, zmniejsza obciążenie mechaniczne, pomaga obniżyć poziom kortyzolu i poprawia jakość snu.



Efektywny trening dla zapracowanych

Osiągnij efekt fizjologiczny porównywalny z 2-godzinną wędrówką lub 1-godzinny treningiem o wysokiej intensywności na siłowni – w zaledwie 10 minut.



Doświadcz Wave Motion w działaniu.

Nowe podejście do zarządzania sarkopenią, oparte na zaawansowanej technologii fali podwójnej PEMF+SONIC, zaprojektowane z myślą o realnych potrzebach.



Nowe podejście do zarządzania sarkopenią.

Skutecznie wspiera utrzymanie masy mięśniowej i funkcji fizycznych dzięki stymulacji na poziomie komórkowym.



Technologia fali podwójnej PEMF + SONIC.

Połączenie pól elektromagnetycznych i fal dźwiękowych zapewnia głęboką stymulację mięśni i krążenia bez obciążania stawów.



10 minut dziennie dla niezwykłych efektów.

Tylko 10 minut dziennie wystarczy, aby wzmocnić mięśnie, poprawić równowagę, krążenie i wspierać ogólną kondycję organizmu.



Technologia przyjazna dla każdego.

Bezpieczna, nieinwazyjna i komfortowa technologia odpowiednia dla osób w każdym wieku i o różnym poziomie aktywności fizycznej.



Jak korzystać — 10-minutowa rutyna dzienna

Prosty i bezpieczny program dla każdego.



KROK 01.

Prawidłowe ustawienie i postawa

Stań na środku platformy oboma stopami i chwyć poręczę lekkim uchwytem. Utrzymuj kolana lekko ugięte (naturalna postawa jeździecka), aby skutecznie absorbować fale dźwiękowe.



KROK 02.

Wybór programu

Za pomocą ekranu dotykowego wybierz preferowany tryb spośród: Manual, Część ciała (obszar docelowy) lub Programy (konkretnie cele).



KROK 03.

Rozpoczęcie 10-minutowej rutyny

Ustaw czas trwania na 10minut na wyświetlaczu. Dostosuj poziom intensywności do swojego komfortu i rozpocznij ćwiczenie.



KROK 04.

Zaawansowane zastosowanie: tryb siedzący

Osoby o ograniczonej mobilności lub użytkownicy wózków inwalidzkich mogą cieszyć się ćwiczeniami, poprzez umieszczenie stóp na platformie podczas siedzenia na krześle.



10 MINUT

Maksymalny efekt w minimalnym czasie.



WIDOCZNE EFEKTY

Lepsza siła, równowaga, krążenie i samopoczucie.



BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE

Technologia przyjazna ciału i stawom.

Zasady naukowe: PEMF+SonicDual Wave

Więcej niż vibracja mechaniczna — kompleksowa opieka na poziomie komórkowym dzięki przyjaznej dla organizmu energii falowej.



PEMF (Pulsacyjne Pole Elektromagnetyczne)

- **Aktywacja nerwowo-mięśniowa i mikrokrążenia:** stymuluje nerwy i mięśnie, jednocześnie poprawiając przepływ krwi.
- **Spersonalizowana stymulacja o niskiej częstotliwości:** optymalizuje niskie natężenie i częstotliwość fali w zależności od indywidualnych potrzeb.
- **Wsparcie metabolizmu komórkowego i regeneracji:** zwiększa produkcję ATP i wspiera naprawę komórek.



SONIC (Fala dźwiękowa)

- **Głęboka penetracja tkanek:** dociera poza skórę i powięź, do najbliższych warstw mięśni.
- **Technologia bez obciążenia stawów (non-motor):** eliminuje mechaniczny wpływ na stawy, dostarczając energię w sposób bezpieczny.
- **Pionowa rezonansowa stymulacja:** zapewnia płynny, a zarazem intensywny ruch w pionie dla skutecznej stymulacji.



Rezonans z częstotliwościami biologicznymi

Trójwymiarowa stymulacja od powierzchniowych mięśni, po głęboko położone nerwy.



Elementy zestawu.

Wszystko, czego potrzebujesz,
aby rozpocząć swoją podróż z Wave Motion.



Przewód zasilający



Gumowe podkładki poziomujące



Kabel audio



Klucz typu T (do montażu)



Śruby (14 szt.)



Instrukcja obsługi (wersja papierowa)



Specyfikacja produktu.



Dostępne kolory



Nazwa produktu



Model



Technologia



Zasilanie



Pobór mocy



Wymiary



Waga



Zakres częstotliwości drgań



Poziomy intensywności



Amplituda drgań



Wyświetlacz



Ustawienie czasu



Konstrukcja



Przeznaczenie



Kraj pochodzenia /
Producent

Urządzenie do ćwiczeń falowych całego ciała Wave Motion

WME -01

Połączenie ultradźwięków (SONIC) i PEMF

100-240 V~, 50/60 Hz

350 W

930 (D) × 820 (S) × 1660 (W) mm

110 kg

5 – 30 Hz

10 poziomów (10% – 100%)

Maks. 8 – 58 mm (regulowana
przez intensywność)

7-całowy ekran dotykowy LCD

1 – 20 minut (możliwość dostosowania)

Wytrzymała, sztywa rama

Tylko do użytku wewnętrznego

Republika Korei / Hue Light Co., Ltd.



Bezpieczne i skuteczne

Technologia bez obciążania
stawów i mięśni.



Intuicyjna obsługa

7" ekran dotykowy
z prostą nawigacją.



Stabilna konstrukcja

Niska vibracja podstawy,
cichy i płynny ruch.



Ergonomiczny design

Wygodne uchwyty i antypoślizgowa
platforma dla pełnego bezpieczeństwa.